


ANIOXYDE 1000

Högdesinficerande
medel / kallsterilisering

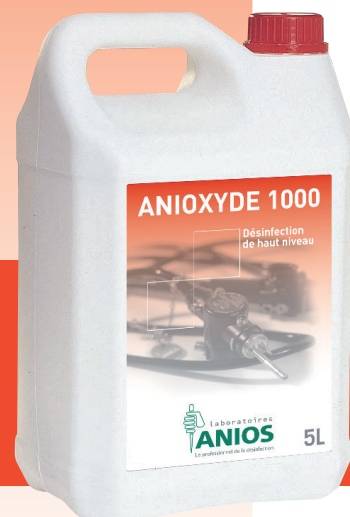

- Patenterad produkt
- Första högdesinficerande medlet och kemiska steriliseringsmedlet från Phéra®-systemet
- Extemporeproduktion av perättiksyra
- Alternativ till glutaraldehyd
- Framställd utan aldehyd: ingen proteinbindning
- Framställd utan ättiksyra, pH-neutralt
- Kontroll av badets effektivitet med teststickor
- Fullt spektrum på 5 minuter

ANVISNINGAR

Desinfektion på hög nivå/kallsterilisering av medicinsk-kirurgisk utrustning, endoskopiutrustning, värmekänsliga material och medicintekniska produkter.

EGENSKAPER

- Ingen ättiksyreånga: bättre tolerans för användaren.
- Förenklad användning: aktivator integrerad i 5 l-behållaren.
- Produktens effektivitet påvisas vid 900 ppm perättiksyra.
- Hållbarhet för blötlägningsbadet: Högst 14 dagar, kontrollera lösningens egenskaper med teststickor.
- Kompatibel med alla typer av fördesinficerande rengöringsmedel med neutralt pH-värde.
- Kompatibel med alla typer av hoar och diskbänkar.
- Kan användas vid förekomst av ångutsugssystem.
- Begränsar korrosion av metaller genom närvaro av anti-korrosiva ämnen.
- Desinfektionslösningen innehåller 1 500 ppm APA (efter aktivering) till 900 ppm (gränskoncentration som detekteras med teststickor).


ANVÄNDNINGSKLAR
EFTER AKTIVERING



ANIOXYDE 1000

Högdesinficerande medel / kallsterilisering


BRUKSANVISNING

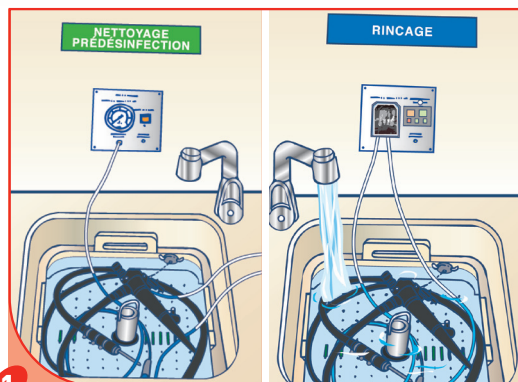


1 **Steg före desinfektion:** Rengör den medicintekniska produkten med en produkt av typ ANIOSYME DD1. Skölj noggrant. Endoskopiutrustning: badda på och spola igenom.



2 **Desinfektionssteg: håll den aktiverade lösningen** (läs om hur lösningen aktiveras på etiketten/i protokollet). Täck över tanken. **Kontaktid: 5 minuter.** För endoskopiutrustning: låt lösningen cirkulera inuti kanalerna.

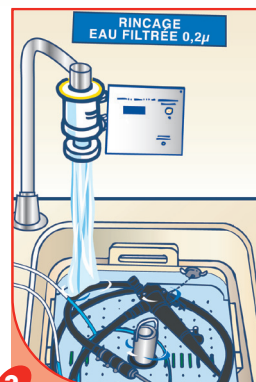

3 Skölj den medicinska utrustningen noggrant i sterilt eller filterat vatten (0,2 µm). För endoskopiutrustning: yttre och inre delar av den medicintekniska produkten.

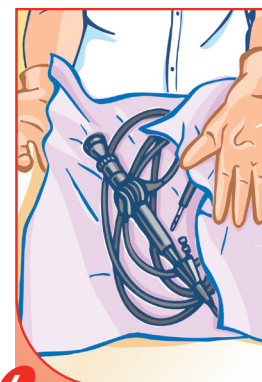

4 Torka av med en engångsduk. Förvara den medicintekniska produkten så aseptiskt som möjligt tills vidare användning.

KVALITATIV SAMMANSÄTTNING

Extemporeproduktion av perättiksyra från acetylcaprolactam (PHERA®-systemet). ANIOXYDE 1000 GENERATOR innehåller 3 % väteperoxid.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Farligt – Följ säkerhetsföreskrifterna (Fastställda enligt gällande europeiska regler i fråga om klassificering och märkning av kemiska produkter) Förvaring: 5 °C till 25 °C.

FÖRVARAS UPPRÄTT

Medicinteknisk produkt klass IIb (direktiv 93/42/EEG med ändringar).

FÖRPACKNING

- 1** 4 dunkar à 5 l + integrerad aktivatorRef. 1081.299
2 Teststickor (50 per ask).....Ref. 100.194

MIKROBIOLOGISKA EGENSKAPER

Aktivt på	Normer	Kontaktid
Bakterier	EN 1040, EN 13727, EN 14561	5 Minuter
Mykobakterier	EN 14348, EN 14563	5 Minuter
Jäst / Mögel	EN 1275, EN 13624, EN 14562	5 Minuter
Virus	EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus, MNV	5 Minuter
Bakterie-spörer	EN 14347 : - Bacillus subtilis - Bacillus cereus EN 13704 : - Bacillus subtilis (5 log) - Bacillus cereus - Clostridium sporogenes - Clostridium difficile	5 Minuter

